

# FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-066 • Rev. 0  
Vigente desde Dic-20-23

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO



eufar  
Línea Bioseguridad

## LIMPIADOR Y RESTAURADOR DEL ESTADO ORIGINAL DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA DEL AUTOCLAVE, BANDEJAS Y CARROS EN ACERO INOXIDABLE

Autoclave foaming cleaning system



RENOVADOR CÁMARA  
DE AUTOCLAVE Y SUPERFICIES  
DE ACERO INOXIDABLE



### Ventajas

- Listo para usar.
- Uso preventivo y correctivo.
- Neutralizador de residuos alcalinos que se adhieren a las paredes.
- No genera vapores.
- No deja residuos.
- Desodoriza.

### Mecanismo de acción

Actúa limpiando y removiendo la corrosión y los residuos que deja el agua utilizada en la autoclave.

### Rendimiento

Espuma x 750 mL rinde aprox. 1071 aspersiones.

### Recomendaciones de uso en Autoclaves

#### Use elementos de protección personal (EPP)

- Asperje cantidad suficiente del producto, en la cámara del autoclave, la cual debe estar fría.
- Deje en contacto de 1 a 5 minutos.
- Frote con paño o cepillo suave.
- Realice el proceso de enjuague o realice un ciclo corto del autoclave.
- Repita este procedimiento semanalmente o cuando considere necesario.

### Indicaciones de uso en Superficies, Carros y Bandejas

#### Use elementos de protección personal (EPP)

- Asperje el contenido del producto en la superficie.
- Deje en contacto de 1 a 5 minutos.
- Frote con paño o cepillo suave.
- Realice el proceso de enjuague.
- Repita este procedimiento periódicamente o cuando considere necesario.



# FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-066 • Rev. 0  
Vigente desde Dic-20-23

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO



eufar  
Línea Bioseguridad

## LIMPIADOR Y RESTAURADOR DEL ESTADO ORIGINAL DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA DEL AUTOCLAVE, BANDEJAS Y CARROS EN ACERO INOXIDABLE

Autoclave foaming cleaning system



RENOVADOR CÁMARA  
DE AUTOCLAVE Y SUPERFICIES  
DE ACERO INOXIDABLE

### Condiciones de almacenamiento

- Manténgase bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz y lejos del alcance de los niños.
- No refrigerar.

### Precauciones

- No use sobre cromo, plata y aluminio.
- Puede ser nocivo si se ingiere.
- Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- No mezcle con otros productos.
- Ver hoja de seguridad en [www.eufar.com](http://www.eufar.com).

### Aspecto físico

Líquido azul claro, inodoro, libre de partículas extrañas.

### Composición

Antioxidante y excipientes

### Vida útil

4 años.

### Biodegradabilidad y disposición final

- **PERIFAR** es biodegradable.
- Una vez agotado el contenido, enjuague el recipiente, tápelo y envíelo a reciclaje.
- Fórmula amigable con el medio ambiente, no contiene fosfatos.

### Certificación No requiere

N° 2023033651

### Presentación

- 750 mL en espuma.



Contáctanos

✉ [ventas@eufar.com](mailto:ventas@eufar.com)

☎ +57 304 462 8755

