





Aplica para autoclaves de mesa Clase N, S, B de cualquier capacidad y marca en el sector salud. Minimiza los costos en mantenimientos preventivos y correctivos, ahorrando en repuestos adicionales. Adquiera protocolos, fichas técnicas, hojas de seguridad y otros en [www.eufar.com](http://www.eufar.com)

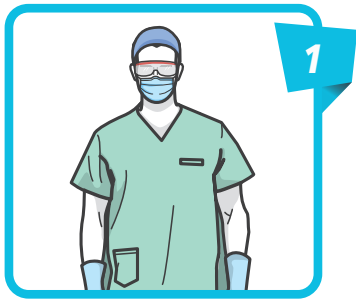


1

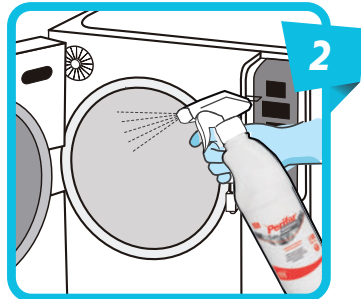


2




2.1

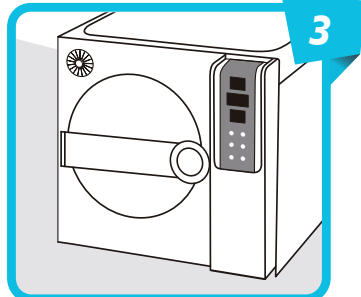

3

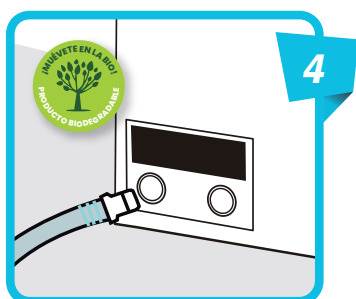

4

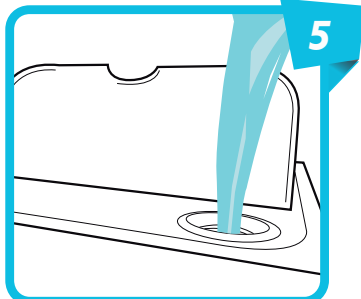

5



6



7

## RECOMENDACIONES POSTERIOR A SU USO

1. Use elementos de protección personal (EPP).
2. Con la cámara fría del Autoclave, retire las bandejas y haga aspersión directa de **PERIFAR AUTOCLAVES** sobre la superficie de la cámara y frote con un paño.
- 2.1. En las partes donde se encuentren acumulaciones de óxido y/o residuos de sales minerales, realice fricción para remover los excesos de manchas y óxido de la superficie.
3. Realice un ciclo corto de esterilización según su modelo.
4. Al final del ciclo de esterilización drene el agua de desecho.
5. Llene el depósito de agua destilada y realice un nuevo ciclo de esterilización.
6. En los accesorios internos del autoclave tanto rack como bandejas, haga aspersión directa de **PERIFAR AUTOCLAVES**, deje 5 minutos, frote con un cepillo y enjuague con agua.
7. Realice la limpieza y desinfección de forma externa del Autoclave con un paño de **EUCIDA FREE ALCOHOL WIPES**.

## PERIFAR AUTOCLAVES PUEDE USARSE EN

- A. Racks y superficies de acero inoxidable.
- B. Bandejas y Carros de acero inoxidable.

*Recomendaciones: Para obtener mejores resultados, limpie el autoclave cada 20 ciclos o una vez por semana según sea necesario.*

