

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-069 • Rev. 4
Vigente desde: 26-11-24

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

Bonzyme[®] Xtra

eufar
Línea Bioseguridad

DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO 5 ENZIMAS



PRE-LAVADO Y LAVADO
DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
DE ENDOSCOPIA



PROTEASA
Degrada proteínas

LIPASA
Degrada lípidos y grasas

AMILASA
Degrada almidones

PECTINASA
Degrada residuos orgánicos

MANANASA
Degrada sustratos



Ventajas

- Es una formulación con compuestos hidrofílicos y lipofílicos, que le permite remover fácilmente grasas, proteínas, polisacáridos y carbohidratos (tejidos, mucosas, fluidos corporales, biocarga y biofilm).
- Por tener un pH neutro es compatible con todo tipo de materiales: Plástico, caucho, acero, vidrio, metales y otros.
- Compatible con toda clase de instrumental. No lo daña, ni lo mancha.
- Use **BONZYME[®] XTRA** en: prelavado y lavado manual o con lavadoras ultrasónicas y termodesinfectoras.
- Permite un paso fluido y efectivo en las líneas de evacuación.
- Produce poca espuma.
- Es una formulación que no contiene fósforo ni sus derivados.
- Actúa en 1 minuto.

Instrucciones de uso

- Use **BONZYME[®] Spray** justo después de los procedimientos para evitar la adherencia de la materia orgánica y mantener la humedad, asegurando una pre-limpieza ideal hasta el reprocesamiento con **BONZYME[®] XTRA**.
- Con el sistema de dosificación adjunto, mida 7,5 mL de **BONZYME[®] XTRA** o 2 push por cada litro de agua tibia o fría. Adicione **BONZYME[®] XTRA** al agua potable. Después de diluido, utilícelo en el menor tiempo posible.
- Sumerja completamente el material contaminado durante 1 minuto en la dilución recientemente preparada.
- Use cepillo o esponja suave si es necesario.
- Si cuenta con equipo para lavado automático, siga las instrucciones, usando el producto diluido.
- Enjuague muy bien el instrumental con agua potable, seque y continúe con el proceso de desinfección o esterilización establecido por su protocolo.
- Deseche el **BONZYME[®] XTRA** ya utilizado al desagüe (no requiere tratamiento adicional).

Presentación y Rendimiento

- 1 Galón equivale a 506.6 litros diluidos.
- 5 Litros equivale a 666.6 litros diluidos

Aspecto físico

Líquido de color azul, translúcido, de olor característico y libre de partículas extrañas.

FICHA TÉCNICA

FT-PT-ASG-069 • Rev. 4
Vigente desde: 26-11-24

Este documento es emitido por Eufar, está limitada su reproducción y es un DOCUMENTO NO CONTROLADO

Bonzyme[®] Xtra

eufar
Línea Bioseguridad

DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO 5 ENZIMAS



PRE-LAVADO Y LAVADO
DE INSTRUMENTAL Y EQUIPOS
DE ENDOSCOPIA

Descripción

- Es un detergente multienzimático indicado en el proceso de limpieza de Dispositivos Médicos, (instrumental, materiales termosensibles, endoscopios, elementos de protección personal reutilizables, material quirúrgico).
- Usado en los campos médico, clínico, bacteriológico, odontológico y afines.
- Es ideal para remover y degradar sangre, grasas, proteínas, almidones, desechos celulares, tejidos, secreciones respiratorias, mucosas, saliva, heces y cualquier otro tipo de material orgánico.

Composición

- Enzimas: Proteasa, Lipasa, Amilasa, Pectinasa y Mananasa.
- Tensioactivos (iónicos y no iónicos) y estabilizantes.

Vida útil

3 años.

Estabilidad

- Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento, siguiendo las precauciones indicadas.
- No mezcle el producto con blanqueadores, ácidos ni otros productos detergentes ni desinfectantes.
- El producto puede presentar ligeras variaciones de olor y/o color por contener activos derivados de procesos Biotecnológicos.
- No reutilice ni almacene **BONZYME® XTRA** diluido.

Biodegradabilidad y disposición final

- No contamina el ambiente. Libre de fosfatos.
- Biodegradable. Comprobado mediante prueba OECD (301D).
- Una vez agotado el contenido, enjuague bien el envase, escúrralo, tápelo y envíelo a reciclaje.

Condiciones de almacenamiento

BONZYME® XTRA debe mantenerse bien tapado, en sitio fresco, protegido de la luz, del calor y lejos del alcance de los niños.

Precauciones

- Se deben utilizar los elementos de protección personal.
- Prohibido devolver saldos diluidos o utilizados al recipiente original.
- Ver hoja de seguridad en www.eufar.com

Clasificación de riesgo

No aplica

Registros Sanitarios

- (COL.) No requiere. Certif. INVIMA 2024010908
- Reg. (PER) DM28773E

Presentaciones

- Galón 3,8 L (con válvula dosificadora).
- 5 Litros (con válvula dosificadora).

Partida arancelaria

38.08.94.19.00



Contáctanos

✉ ventas@eufar.com
☎ (+57) 304 462 8755

Fabricado por Laboratorios Eufar S.A.
Bogotá, Colombia

 eufar.com