




Este protocolo aplica para todos los profesionales de la salud oral. Adquiera protocolos, fichas técnicas, hojas de seguridad y otros en www.eufar.com




1



2

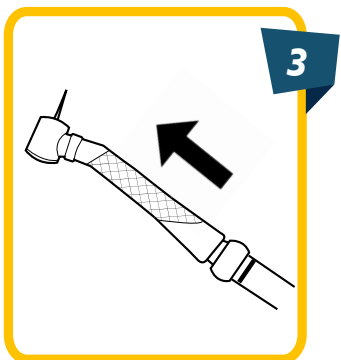

3

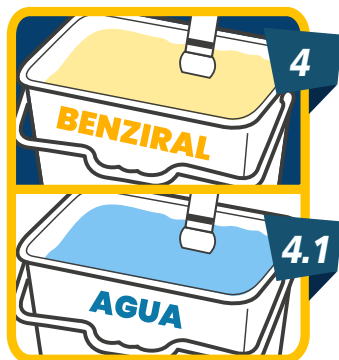

4

4.1



5



6

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Use elementos de protección personal (EPP).
2. Mida 7,5 mL de **BENZIRAL®** o 2 push por cada litro de agua potable. Utilice la solución inmediatamente, no deje producto preparado.

BENZIRAL® es un detergente y desinfectante compatible con los materiales de las unidades odontológicas.

CIRCUITO DE ASPIRACIÓN LINEAS DE AGUA

3. Separe la pieza de mano y eyectores de la manguera.
4. Al finalizar la jornada, succione al menos 800mL de **BENZIRAL®** diluido a través de los conductos o mangueras (aprox. el 80% de solución preparada de Benziral). Dejar actuar durante la noche.
 - 4.1. Al día siguiente, antes de iniciar la jornada, succione 1 litro de agua potable por los conductos o mangueras para realizar el enjuague.

ESCUPIDERA

5. Al finalizar la jornada, vierta 200mL de **BENZIRAL®** diluido en la escupidera (aprox. el 20% de la solución previamente preparada). Dejar actuar durante la noche.
6. Al día siguiente, antes de iniciar la jornada, vierta 1 litro de agua potable por la escupidera para realizar el enjuague.

**Repita el proceso de 2 a 3 veces por semana en la unidad odontologica.*

